

BEYİD TÜRKÇE KONUŞAN BANYO TARTISI KULLANIM KILAVUZU

Kullanmaya başlamadan önce lütfen burada yer alan talimatları dikkatle okuyunuz. Tartılar sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ticari amaçlar için kullanılamaz.

Değerli Müşterimiz,

Ürün seçiminde Beyid ve Engelliler Marketi'ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz. Garantiden doğan hakların kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz. Ayrıca, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Beyid Bilişim

Teknik özellikler:

- * Kapasite: 3,0-180kg
- * Kademeler: 0,1kg (100 Gr)
- * Enerji tasarruflu LCD gösterge
- * Ağırlık için sesli bildirim
- * Ağırlık birimleri: KG/LB
- * Yüksek hassasiyetli gerilim ölçer sensör sistemine sahiptir
- * Temperlenmiş emniyetli cam plaka platform
- * Ayak-temas anahtarı
- * Otomatik sıfırlama
- * Otomatik kapanma
- * Aşırı yük göstergesi
- * Düşük pil göstergesi
- * Ölçüler: 310*310*27.5mm
- * 2 adet 1,5v AAA pille çalışır, piller birlikte verilmez

Güç Kaynağı

2 adet 1,5v AAA pille çalışır, lütfen tartıyı kullanmaya başlamadan önce pilleri takınız

Kullanım Talimatları

1. Tartının arkasında bulunan düğmeyi kullanarak ağırlık modunu (kg/lb) seçiniz.
2. Ölçüm doğruluğu için tartıyı sağlam, düz ve engebesiz bir yüzeye yerleştiriniz.
3. Platform üzerinde düzgün bir şekilde durduğunuzda bilgisayar ağırlığınızı otomatik olarak hesaplayabilir ve sonrasında bunu size sesli olarak okuyabilir (varsayılan ses kilogram birimini kullanır ve ses özelliği sadece kilogram içindir, diğer birimleri kullanmak isterseniz "UNIT" düğmesine basınız, mod lb olduğunda sesli bildirim yapılmaz).
4. Arka kısımdaki "UNIT" düğmesine 3 saniye boyunca basınız, ekranda ONN veya OFF görünür. OFF ibaresi, sesin kapalı olduğunu belirtir.
5. Ağırlık görüntüledikten 6 saniye sonra tartı otomatik olarak kapanır.

Aşırı yük göstergesi

LCD ekranda "EEEE" yazarsa, maksimum ağırlık olan 180 kg aşıldı demektir.

DÜŞÜK PİL GÖSTERGESİ

LCD ekranda "LO" yazarsa, pilleri değiştirmeniz gerekir.

Pil Güvenlik Tavsiyesi

Her Zaman

1. Önerilen pilleri kullanınız.
2. Pil bölmesinin güvende olduğundan emin olunuz.
3. Pilleri doğru bir şekilde takınız, pillerin üzerinde ve bölmede görülen artı ve eksi işaretlerine uyunuz.
4. Kullanılmayan pilleri paketlerinde saklayınız ve metal nesnelere uzak tutunuz, aksi halde bir kısa devre ortaya çıkabilir.
5. Biten pilleri tartıdan çıkarınız.
6. Eğer tartı uzun süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarınız.
7. Pilleri küçük çocuklardan uzak tutunuz.
8. Eğer bir pilin yutulduğunu düşünürseniz bir doktora başvurunuz.
9. Asla

-Pilleri ateşe atmayınız.

-Normal pilleri şarj etmeye çalışmayınız.

Kullanım ve Bakım Tavsiyesi

1. Tartının düz, engebesiz ve sağlam bir yüzeyde olmasını sağlayınız. Halı veya diğer yumuşak yüzeylerden kaçınınız.
2. Tartıların yüzeyi ıslaksa kaygan olabilir, bu yüzden kuru tutulmalıdır.
3. Kullanım sonrasında temizlemek için hafifçe nemli bir bez kullanınız. Çözücüler kullanmayınız, ürünü suya batırmayınız.
4. Tartıları aşırı yüklemekten kaçınınız, aksi halde kalıcı hasarlar meydana gelebilir.
5. Tartıyı, kullanılmadığı zaman dik biçimde saklamayınız. Aksi halde piller bitebilir.
6. Tartıyı darbelere veya titreşimlere karşı koruyunuz (tartıyı yere düşürmek veya tartının üzerine bir nesne düşürmekten kaçınınız).

SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEĞİYLE...

Beyid Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim Danışmanlık San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. Feridiye

Cad. No:21 Kat:2 Fidan Apt. Taksim

Beyoğlu-İstanbul-Türkiye

+90 0212 361 6661 +90 850 430 1071

info@beyid.com.tr

www.beyid.com.tr

www.engellilermarketi.com